


REKOMENDASI PROSEDUR PENYIAPAN SAMPEL BIRD SEXING

1. Rekomendasi Prosedur Penyiapan Sampel Darah

Untuk membantu kami dalam memproses sampel lebih cepat dan akurat, kami mohonkan untuk Bapak/Ibu untuk mempersiapkan sampel seperti pada gambar berikut

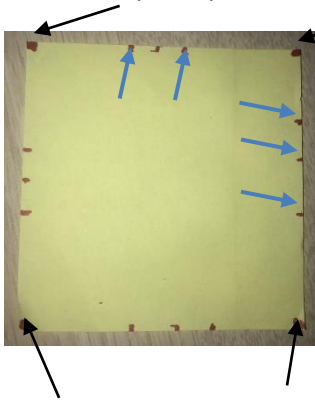

Oleskan darah pada ujung-ujung kertas (panah hitam)
(disarankan untuk memenuhi keempat ujung-ujung kertas
tersebut yang berguna jika harus dilakukan pengulangan)

Sebagai alternatif jika tidak bisa dilakukan pada ujung-
ujung kertas, pengolesan darah bisa dilakukan di pinggir
kertas (**panah biru**)

2. Rekomendasi Prosedur Penyiapan Sampel Buluh

Pilihlah sampel buluh seperti pada **panah hitam** yang memiliki ciri adalah ujung bulu yang melingkar dan tidak pipih, hindarkan pengiriman sampel bulu yang ditunjukkan **panah merah** atau **kuning**



yang sangat berpotensi pada kesalahan hasil pengujian dan waktu pengujian yang lama (terutama pada sampel warna merah)